

schülke -t



Płynny koncentrat o odczynie alkalicznym, do maszynowego mycia narzędzi i wyposażenia medycznego.

thermosept® RKF płyn

Zalety

- nie zawiera fosforanów,
- doskonała skuteczność mycia,
- nie pieni się,
- pozytywnie zaopiniowany przez Miele,



Obszary zastosowania

thermosept® RKF przeznaczony jest do mycia narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, basenów, butów używanych na salach operacyjnych, butelek niemowlęcych, kontenerów ze stali szlachetnej oraz pojemników na narzędzia. W przypadku przygotowywania materiałów zawierających utleniane anodowo aluminium należy sprawdzić ich odporność na działanie alkaliów lub zastosować neutralny preparat thermosept® RKN-zym, lub zastosować lekko alkaliczny preparat thermosept® X-tra. thermosept® RKF może być stosowany automatycznych myjniach dezynfektorach lub myjniach tunelowych.

Właściwości produktu

thermosept® RKF jest płynnym, alkalicznym środkiem myjącym (w postaci koncentratu), nie zawierającym fosforanów i związków powierzchniowo czynnych, przeznaczonym do termicznego i chemiczno-termicznego przygotowywania do ponownego użytku narzędzi i wyposażenia medycznego.

Wskazówki dotyczące stosowania

Stężenie użytkowe: 0,3 - 1 %. Dozowanie preparatu odbywa się za pomocą pomp, stanowiących wyposażenie myjni maszynowych. Po procesie mycia zalecamy neutralizację preparatem thermosept® NKZ w celu usunięcia pozostałości alkalicznych.



Dane produktu

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004:
< 5 % fosfoniany. Zawiera wodorotlenek potasu. Dodatkowe składniki: inhibitory korozji.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciecz
Gęstość	1,12 - 1,13 g/cm ³ / 20 °C
Kolor	bezbardwy - żółty
pH	14 / 100 % / 20 °C
Tarcie, dynamiczne	ok. 3 mPa*s / Metoda : ISO 3219
Temperatura zapłonu	> 100 °C / Metoda : ISO 2719

Wskazówki szczególne

Sprzęt wykonany z aluminium anodowanego powinien być przetestowany pod kątem odporności na alkalia. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. Nie stosować po upływie terminu ważności. Termin ważności: 5 lat.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
THERMOSEPT RKF płyn 5kg KA	1/Kanister	146305

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. D-150-10003



Schülke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dystrybutor
Schülke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schulke.pl

Wytwórca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com